



Nombre

## Panty terapéutica Therapeutic Panty

Código externo

05.01.20PP/21PP

Código interno

60.20PP/21PP

Descripción

Media de compresión graduada hasta la cintura diseñada para el uso diario. Brinda soporte activo en el tratamiento y prevención de insuficiencia venosa. Ideal para usuarios que permanecen en posición sedentaria o de pie, por tiempo prolongado; o bien para viajeros frecuentes.

Disponible en compresión baja (8-15 mm/Hg) y media (15-20 mm/Hg).

Color piel.

Modo de acción

La compresión graduada favorece el retorno del flujo sanguíneo y el drenaje linfático, reduce la fatiga, el dolor de piernas y previene la hinchazón de los tobillos.

Materialidad

Confeccionada a partir de un tejido elástico de compresión graduada, la cual varía a lo largo de la media, presentándose la máxima compresión en el tobillo, disminuyendo hacia la rodilla y el pie.

Tabla de tallas

Según número de calzado

	S	7798094548074
20PP	M	7798094548081
	L	7798094548098
	XL	7798094548104
	XXL	7798094548104
	S	7798094548203
21PP	M	7798094548203
	L	7798094548210
	XL	7798094548227
	XXL	7798094548234

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

Evite enrollar las medias para su colocación.

1. Abrir la media e introducir el pie hasta que la puntera y el talón se encuentren en su lugar.
2. Tomar la parte superior de la media y tirar hacia arriba con firmeza y suavidad, pasando por sobre los tobillos, pantorrillas y muslos. Debe poder mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Estirar la media hasta colocar la banda de ajuste superior sobre la cintura.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
6. Verificar la media a lo largo del día y en caso de que presente pliegues, estirar para mantener siempre la compresión adecuada.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

20PP: Poliamida 80% Elastano 20%  
21PP: Poliamida 75% Elastano 25%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Se recomienda el producto para personas que deban pasar varias horas parados o sentados. Los productos de compresión no deben utilizarse y están contraindicados si se presenta alguna de las siguientes condiciones médicas: insuficiencia arterial aguda, infecciones cutáneas, dermatitis aguda, dermatitis húmeda, insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, irritación cutánea, alergia a los tintes.

Patologías

- \* Várices
- \* Insuficiencia venosa
- \* Fatiga crónica
- \* Drenaje linfático deficiente

Productos relacionados

20RP - 21RP - 20MP - 21MP - 21HA - 21HN

Envase	Estuche
Cantidad	1 par
Color	Beige
NCM	6115.10.21
Peso sin envase	65 g / 0,065 Kg
Peso con envase	85 g / 0,085 Kg
Volumen con envase	586,5 cm3 / 0,0005865 m3
Industria/Origen	Argentina

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-13 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global



Nombre

## Panty terapéutica Therapeutic Panty

Código externo

05.01.20PP/21PP

Código interno

60.20PP/21PP

Tabla de tallas

HT (in.)	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	Weight (pounds)	
4'11"		S	S	S	S	S	S	S	S	m																			150
5'10"		S	S	S	S	S	S	S	m	m	m	m					XXL	XXL	XXL	XXL									152.5
5'1"	S	S	S	S	S	S	S	m	m	m	m	m	m	m	L	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL							155
5'2"	S	S	S	S	S	S	m	m	m	m	m	m	L	L	L	L	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL							157.5
5'3"	S	S	S	S	S	m	m	m	m	m	m	L	L	L	L	L	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	160
5'4"		S	S	m	m	m	m	m	m	L	L	L	L	L	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	162.5
5'5"		S	m	m	m	m	m	m	L	L	L	L	L	L	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	165
5'6"				m	m	m	m	L	L	L	L	L	L	L	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	167.5
5'7"				m	m	m	L	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL		170
5'8"					L	L	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL		172.5	
5'9"						L	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XXL			175							
5'10"						L	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL							178	
5'11"							L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL							180.5	
Peso (kg)	41	43	45	47	50	52	54	56	58	61	63	65	68	70	72	74	76	78	80	82	84	87	89	93	95	98	100	HT(cm)	
	SMALL				MEDIUM				LARGE				X-LARGE				XX-LARGE												

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.