



Nombre

## Media terapéutica hasta la rodilla Knee-High support stockings

Código externo

05.01.20RP/21RP

Código interno

60.20RP/21RP

Descripción

Media de compresión graduada hasta la rodilla diseñada para el uso diario. Brinda soporte activo en el tratamiento y prevención de insuficiencia venosa. Ideal para usuarios que permanecen en posición sedentaria o de pie, por tiempo prolongado; o bien para viajeros frecuentes.

Disponible en compresión baja (8-15 mm/Hg) y media (15-20 mm/Hg).

Color piel.

Modo de acción

La compresión graduada favorece el retorno del flujo sanguíneo y el drenaje linfático, reduce la fatiga, el dolor de piernas y previene la hinchazón de los tobillos.

Materialidad

Confeccionada a partir de un tejido elástico de compresión graduada, la cual varía a lo largo de la media, presentándose la máxima compresión en el tobillo, disminuyendo hacia la rodilla y el pie.

Tabla de tallas

Según número de calzado

	S	34 - 35	7798094548296
20RP	M	35,5 - 37,5	7798094548302
	L	38 - 40,5	7798094548319
	XL	41 - 43	7798094548326
21RP	S	34 - 35	7798094548296
	M	35,5 - 37,5	7798094548302
	L	38 - 40,5	7798094548319
	XL	41 - 43	7798094548326

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

Evite enrollar las medias para su colocación.

1. Abrir la media e introducir el pie hasta que la puntera y el talón se encuentren en su lugar.
2. Tomar la parte superior de la media y tirar hacia arriba con firmeza y suavidad hasta la rodilla. Debe poder mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Verificar las medias a lo largo del día y en caso de que presenten pliegues, estirarlas para mantener siempre la compresión adecuada.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Retirar el producto en caso de sentir entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida, frote suavemente el área y vuelva a realizar la colocación. Los productos de compresión no deben utilizarse y están contraindicados si se presenta alguna de las siguientes condiciones médicas: insuficiencia arterial aguda, infecciones cutáneas, dermatitis aguda, dermatitis húmeda, insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, irritación cutánea, alergia a los tintes.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Várices
- \* Insuficiencia venosa
- \* Fatiga crónica
- \* Drenaje linfático deficiente

Composición

20RP: Poliamida 80% Elastano 20%  
21RP: Poliamida 75% Elastano 25%

Productos relacionados

20MP - 21MP - 20PP - 21PP - 21HA - 21HN

Envase	Estuche
Cantidad	1 par
Color	Beige
NCM	6115.10.21
Peso sin envase	15 g / 0,015 Kg
Peso con envase	55 g / 0,055 Kg
Volumen con envase	586,5 cm3 / 0,0005865 m3
Industria/Origen	Argentina

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-13 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global